

添付文書改訂のお知らせ

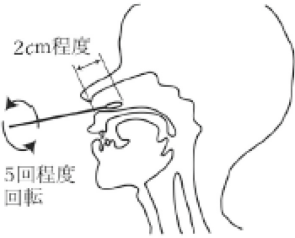
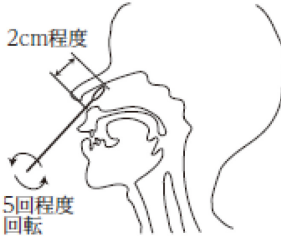
2022年11月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の添付文書を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された添付文書をご参照くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

記

インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B

改訂部分抜粋（ _____ 改訂）

改訂後(2022年11月改訂 第12版)	改訂前(2022年2月改訂 第11版)
【用法・用量（操作方法）】 ● 検体の採取方法 1) 検体採取の準備 ① 滅菌綿棒： ・咽頭ぬぐい液を検体とする場合は別売の滅菌綿棒(咽頭用/角結膜用/唾液用)をご使用下さい。 2) 検体の採取方法 ② 鼻腔ぬぐい液 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度、顔の中心に向かって挿入し、鼻腔壁に軽く当てゆっくり5回程度回転させ、5秒程度静置して綿球を湿らせ採取します。  ※イラストの変更	【用法・用量（操作方法）】 ● 検体の採取方法 1) 検体採取の準備 ① 滅菌綿棒： ・咽頭ぬぐい液を検体とする場合は別売の滅菌綿棒(咽頭用/角結膜用)をご使用下さい。 2) 検体の採取方法 ② 鼻腔ぬぐい液 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し、挿入後、5回程度回転させながら擦るようにして粘膜表皮を採取します。 
【使用上又は取扱い上の注意】 2) 使用上の注意 ④ 抽出液は指定のもの又は「クイック チェイサー® Flu」もしくは「クイックチェイサー® SARS-CoV-2」、 <u>「クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu」</u> 、「クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B」のものを使用し、その他のキットの抽出液は使用しないで下さい。 ⑩ 綿棒はキット付属のニプロスポンジスワブもしくは別売の滅菌綿棒(咽頭用/角結膜用/唾液用)を使用して下さい。	【使用上又は取扱い上の注意】 2) 使用上の注意 ④ 抽出液は指定のもの又は「クイック チェイサー® Flu」のものを使用し、その他のキットの抽出液は使用しないで下さい。 ⑩ 綿棒はキット付属のニプロスポンジスワブもしくは別売の滅菌綿棒(咽頭用/角結膜用)を使用して下さい。

以上