

添付文書改訂のお知らせ

2022年9月 株式会社ミズホメディー

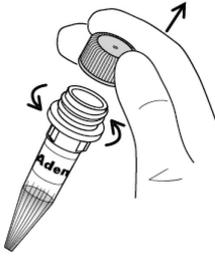
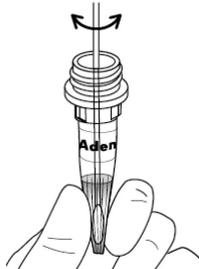
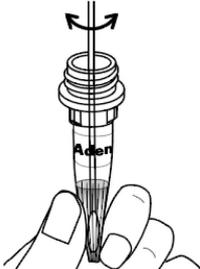
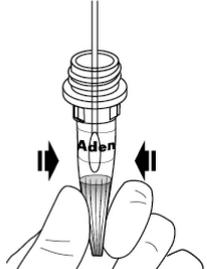
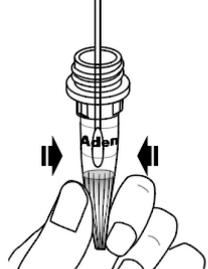
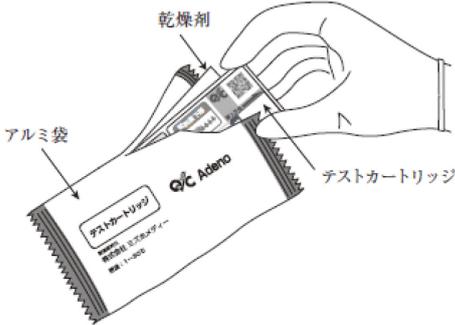
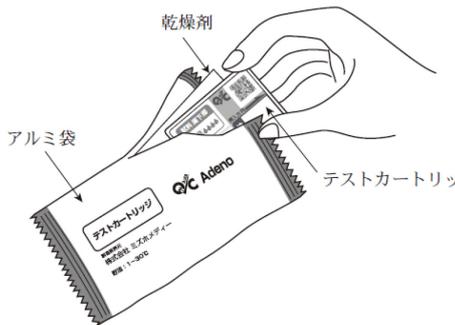
この度、弊社製品の添付文書を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された添付文書をご参照くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

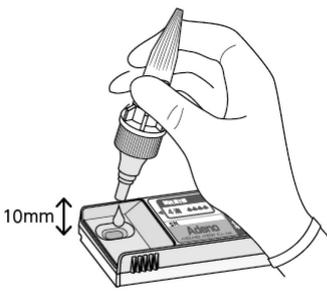
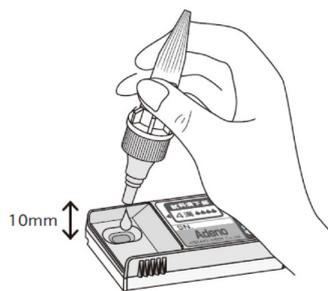
記

アデノウイルスキット クイック チェイサー® Auto Adeno

改訂部分抜粋（.....改訂、———削除）

改訂後(2022年9月改訂 第6版)	改訂前(2019年3月改訂 第5版)
【測定原理】 「クイック チェイサー® Auto Adeno」は、イムノクロマト法 (Immunochromatographic Assay) の原理に基づいたアデノウイルス抗原検出試薬です。 ※太字から本文書体に変更	【測定原理】 「クイック チェイサー® Auto Adeno」は、イムノクロマト法 (Immunochromatographic Assay) の原理に基づいたアデノウイルス抗原検出試薬です。
【操作上の注意】 1) 本品は分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」専用です。 ※太字から本文書体に変更	【操作上の注意】 1) 本品は分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」専用です。
【用法・用量（操作方法）】 ●検体の採取方法 1) 検体採取の準備 ①滅菌綿棒（咽頭用/角結膜用）： ②抽出液：そのままご使用下さい。	【用法・用量（操作方法）】 ●検体の採取方法 1) 検体採取の準備 ①滅菌綿棒（咽頭用）： ②滅菌綿棒（角結膜用）： キット付属のプラスチック軸滅菌綿棒を使用することもできますが、別売の滅菌綿棒（角結膜用）のご使用をお勧めします。 ③抽出液：そのままご使用下さい。
2) 検体の採取方法 ①咽頭ぬぐい液 滅菌綿棒（咽頭用/角結膜用）を口腔から咽頭に挿入し、咽頭後壁、口蓋扁桃の発赤部位を中心に数回擦るようにして、粘膜表皮を採取します。	2) 検体の採取方法 ①咽頭ぬぐい液 滅菌綿棒（咽頭用）を口腔から咽頭に挿入し、咽頭後壁、口蓋扁桃の発赤部位を中心に数回擦るようにして、粘膜表皮を採取します。
②角結膜ぬぐい液 滅菌綿棒（咽頭用/角結膜用）を用いて角結膜を強く擦過し、可能な限り多くの上皮を採取します。	②角結膜ぬぐい液 滅菌綿棒（角結膜用）を用いて角結膜を強く擦過し、可能な限り多くの上皮を採取します。

改訂後(2022年9月改訂 第6版)	改訂前(2019年3月改訂 第5版)
<p>●試料の調製</p> <p>①</p>  <p>※手袋を装着したイラストに変更</p>	<p>●試料の調製</p> <p>①</p> 
<p>②</p>  <p>※手袋を装着したイラストに変更</p>	<p>②</p> 
<p>③</p>  <p>※手袋を装着したイラストに変更</p>	<p>③</p> 
<p>④フィルターを装着して、容器を数回、軽く揺すって 充分混和し、試料とします。</p>	<p>④フィルターを装着して、容器を数回、軽く揺すって 充分混和し、試料とします。</p>
<p>●操作方法</p> <p>1) 専用の分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」それぞれの取扱説明書に従 い、機器の準備を行います。</p> <p>※太字から本文書体に変更</p>	<p>●操作方法</p> <p>1) 専用の分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」それぞれの取扱説明書に従 い、機器の準備を行います。</p>
<p>3) 測定操作法</p> <p>①</p>  <p>※手袋を装着したイラストに変更</p>	<p>3) 測定操作法</p> <p>①</p> 

改訂後(2022年9月改訂 第6版)	改訂前(2019年3月改訂 第5版)
<p>②</p>  <p>10mm</p> <p>※手袋を装着したイラストに変更</p>	<p>②</p>  <p>10mm</p>
<p>③試料滴下後、直ちに分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」(クイック チェイサー Immuno Reader 及びこれと同等の機能を有するデンシトメトリー分析装置) のテストカートリッジ挿入口に挿入し、テストカートリッジ挿入口のカバーを閉じて下さい。</p>	<p>③試料滴下後、直ちに分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」(クイック チェイサー Immuno Reader 及びこれと同等の機能を有するデンシトメトリー分析装置) のテストカートリッジ挿入口に挿入し、テストカートリッジ挿入口のカバーを閉じて下さい。</p>
<p>【使用上又は取扱い上の注意】</p>	<p>【使用上又は取扱い上の注意】</p>
<p>2) 使用上の注意 ⑩綿棒はキット付属の滅菌綿棒を使用して下さい。</p>	<p>2) 使用上の注意 ⑩綿棒はキット付属の滅菌綿棒もしくは別売の滅菌綿棒(角結膜用)を使用して下さい。</p>
<p>【包装単位】</p>	<p>【包装単位】</p>
<p>クイック チェイサー® Auto Adeno 10回用 ※太字から本文書体に変更</p>	<p>クイック チェイサー® Auto Adeno 10回用</p>
<p>・ 付属品 滅菌綿棒 (咽頭用/角結膜用)</p>	<p>・ 付属品 滅菌綿棒 (咽頭用)</p>
<p>文献請求及びお問い合わせは 株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 フリーダイヤル 0120-12-4636 FAX 0942-85-0335</p>	<p>文献請求及びお問い合わせは 株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 フリーダイヤル 0120-12-4636 FAX 0942-85-0335</p>
<p>※太字から本文書体に変更</p>	

以上