

# 電子添文改訂のお知らせ

2023年10月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。  
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

## RS ウイルスキット・アデノウイルスキット クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno

改訂部分抜粋（\_\_\_\_\_改訂）

改訂後(2023年10月改訂 第7版)	改訂前(2022年11月改訂 第6版)
<p>この電子化された添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>	<p>この添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>
<p><b>【一般的な注意】</b></p> <p>4) <u>電子添文</u>以外の使用方法については保証を致しません。</p> <p>7) 専用の分析測定機器の使用に際しては、必ずその<u>電子添文</u>及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。</p>	<p><b>【一般的な注意】</b></p> <p>4) <u>添付文書</u>以外の使用方法については保証を致しません。</p> <p>7) 専用の分析測定機器の使用に際しては、必ずその<u>添付文書</u>及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。</p>
<p><b>【形状・構造等（キットの構成）】</b></p> <p>2) 抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注) <u>クイック チェイサー®</u>の下記品目の抽出液は共通試薬です。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>インフルエンザウイルスキット <u>クイック チェイサー® Auto Flu A,B</u> (製造販売承認番号：22300AMX00568000)</li><li>アデノウイルスキット <u>クイック チェイサー® Auto Adeno</u> (製造販売承認番号：22500AMX00898000)</li><li>RS ウイルスキット・アデノウイルスキット <u>クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno</u> (製造販売承認番号：22700EZX00007000)</li><li>SARS コロナウイルス抗原キット <u>クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2</u> (製造販売承認番号：30300EZX00023000)</li><li>SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット <u>クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu</u> (製造販売承認番号：30400EZX00099000)</li></ul>	<p><b>【形状・構造等（キットの構成）】</b></p> <p>2) 抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 (追加)</p>

改訂後(2023年10月改訂 第7版)	改訂前(2022年11月改訂 第6版)																									
<p><b>【用法・用量（操作方法）】</b></p> <p>●試料の調製 本品で調製した試料と他の「クイック チェイサー® Auto シリーズ」での試料相互使用の関係は下記のとおりです。</p> <table border="1" data-bbox="177 367 782 568"> <thead> <tr> <th>製品名</th> <th>検体</th> <th>鼻腔ぬぐい液</th> <th>咽頭ぬぐい液</th> <th>鼻腔吸引液</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSV/Adeno</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Flu A,B</td> <td></td> <td>○※1</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>SARS-CoV-2</td> <td></td> <td>○※1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>SARS-CoV-2/Flu</td> <td></td> <td>○※1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻咽頭ぬぐい液」として承認</p>	製品名	検体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	RSV/Adeno		○	○	○	Flu A,B		○※1	○	○	SARS-CoV-2		○※1	×	×	SARS-CoV-2/Flu		○※1	×	×	<p><b>【用法・用量（操作方法）】</b></p> <p>●試料の調製 (新設)</p>
製品名	検体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液																						
RSV/Adeno		○	○	○																						
Flu A,B		○※1	○	○																						
SARS-CoV-2		○※1	×	×																						
SARS-CoV-2/Flu		○※1	×	×																						
<p>●操作方法 3) 測定操作方法 ③試料滴下後、直ちに分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」(クイック チェイサー Immuno Reader 及びクイック チェイサー Immuno Reader II) のテストカートリッジ挿入口に挿入し、テストカートリッジ挿入口のカバーを閉じて下さい。</p>	<p>●操作方法 3) 測定操作方法 ③試料滴下後、直ちに分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」(クイック チェイサー Immuno Reader 及びこれと同等の機能を有するデンシトメトリー分析装置) のテストカートリッジ挿入口に挿入し、テストカートリッジ挿入口のカバーを閉じて下さい。</p>																									

以上