

クイック チェイサー Auto用 陽性コントロール Flu

【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。
クイック チェイサー Auto Flu A,B

【使用方法】

- 1)使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーバイアルを取り出します。
- 2)30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3)陽性コントロールの入ったスクリーバイアルをよく混和して下さい。
※本陽性コントロールはスクリーバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
- 4)対象製品付属のニプロスポンジスワブを陽性コントロールに10秒以上浸し、綿球部全体に染み込ませて採取します。
- 5)対象製品の添付文書に従い、試料の調製を行い、測定を行います。
- 6)陽性コントロールFlu Aを使用の場合は、測定結果がA型陽性且つB型陰性であること、陽性コントロールFlu Bを使用の場合は、測定結果がB型陽性且つA型陰性であることを確認して下さい。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1)取り扱い上(危険防止)の注意
 - ①陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 2)使用上の注意
 - ①使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
 - ②陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
 - ③使用後の陽性コントロール及び容器、スワブ等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)またはグルタルアルデヒド(2%、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。但し、テストカートリッジは次亜塩素酸ナトリウム、グルタルアルデヒドなどの消毒液による処理は行わないで下さい。
 - ④容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
 - ⑤試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

【有効期間】

製造後12ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

【包装単位】

クイック チェイサー Auto 陽性コントロール Flu A 150 μ L×5 本
クイック チェイサー Auto 陽性コントロール Flu B 150 μ L×5 本

【問い合わせ先】

株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口

佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

フリーダイヤル:0120-12-4636

FAX:0942-85-0335