

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

# クイック チェイサー® Auto用 陽性コントロール Flu

## ※【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

クイック チェイサー® Auto Flu A,B  
クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu  
クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B

## 【使用方法】

- 1)使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーバイアルを取り出します。
- 2)30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3)陽性コントロールの入ったスクリーバイアルをよく混和して下さい。  
※本陽性コントロールはスクリーバイアル 1 本につき 1 回のみ使用可能です。
- 4)対象製品付属のニプロスポンジスワブを陽性コントロールに10秒以上浸し、綿球部全体に染み込ませて採取します。

\*5)対象製品の電子化された添付文書に従い、試料の調製を行い、測定を行います。

### ※\*6)＜クイック チェイサー® Auto Flu A,B＞

陽性コントロールFlu Aを使用の場合は、測定結果がA型陽性且つB型陰性であること、陽性コントロールFlu Bを使用の場合は、測定結果がB型陽性且つA型陰性であることを確認して下さい。

### ＜クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu＞

陽性コントロールFlu Aを使用の場合は、測定結果がインフルエンザウイルス陽性且つSARS-CoV-2陰性であること、陽性コントロールFlu Bを使用の場合は、測定結果がインフルエンザウイルス陽性且つSARS-CoV-2陰性であることを確認して下さい。

### ＜クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B＞

陽性コントロールFlu Aを使用の場合は、測定結果がA型インフルエンザウイルス陽性且つB型インフルエンザウイルス陰性及びSARS-CoV-2 陰性であること、陽性コントロールFlu Bを使用の場合は、測定結果がB型インフルエンザウイルス陽性且つA型インフルエンザウイルス陰性及びSARS-CoV-2 陰性であることを確認して下さい。

正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

## 【使用上又は取り扱い上の注意】

### 1) 取り扱い上(危険防止)の注意

- ①陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。

### 2) 使用上の注意

- ①使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
- ②陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
- ③使用後の陽性コントロール及び容器、スワブ等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1 時間以上浸漬)又はグルタルアルデヒド(2 %、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20 分以上)による滅菌処理を行って下さい。但し、テストカートリッジは次亜塩素酸ナトリウム、グルタルアルデヒドなどの消毒液による処理は行わないで下さい。
- ④容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
- ⑤試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

## 【貯蔵方法】

2～8℃保存

## \*【有効期間】

製造後24ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

## \*\*【包装単位】

クイック チェイサー® Auto用 陽性コントロール Flu A	150 $\mu$ L×3本
クイック チェイサー® Auto用 陽性コントロール Flu B	150 $\mu$ L×3本

## \*\*【お問い合わせ先】

株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636 (受付：月～金(祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00)