

# クイック チェイサー 陽性コントロール Strep A

## 【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

- クイック チェイサー Strep A
- クイック チェイサー Dip Strep A

## 【使用方法】

- 1)使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーバイアルを取り出します。
- 2)30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3)陽性コントロールの入ったスクリーバイアルをよく混和して下さい。  
※本陽性コントロールはスクリーバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
- 4)対象製品付属の滅菌綿棒(咽頭用)を陽性コントロールに10秒以上浸し、綿球部全体に染み込ませて採取します。
- 5)対象製品の添付文書に従い、試料の調製を行い、測定を行います。
- 6)測定結果が陽性であることを確認して下さい。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

## 【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1)取り扱い上(危険防止)の注意
  - ①本品には保存剤としてアジ化ナトリウム(0.1%未満)が含まれています。使用中に誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 2)使用上の注意
  - ①使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
  - ②陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
  - ③使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート、またはテストストリップ、スワブ等は感染の可能性のあるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)またはグルタルアルデヒド(2%、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
  - ④容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
  - ⑤試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

## 【貯蔵方法】

2～8℃保存

## 【有効期間】

製造後12ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

## 【包装単位】

クイック チェイサー 陽性コントロール Strep A 400μL×5本

## 【問い合わせ先】

株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口

佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

フリーダイヤル:0120-12-4636

FAX:0942-85-0335