

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

クイック チェイサー® Auto用 陽性コントロール Adeno

【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

- クイック チェイサー® Auto Adeno
- クイック チェイサー® Auto Adeno 眼
- クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno

【使用方法】

- 1)使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーバイアルを取り出します。
 - 2)30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
 - 3)陽性コントロールの入ったスクリーバイアルをよく混和して下さい。
※本陽性コントロールはスクリーバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
 - 4)対象製品付属の検体採取具[滅菌綿棒(咽頭用/角結膜用)、ニプロスポンジスワブ、検体採取具(結膜滲出液用)]を陽性コントロールに10秒以上浸し、綿球部全体または検体採取具(結膜浸出液用)のろ紙部に染み込ませて採取します。
- *5)対象製品の電子化された添付文書に従い、試料の調製を行い、測定を行います。
- 6)測定結果がAdeno陽性であることを確認して下さい。2項目を同時に測定する対象製品においてはAdeno以外の項目は陰性となります。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1)取り扱い上(危険防止)の注意
 - ①陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 2)使用上の注意
 - ①使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
 - ②陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
 - ③使用後の陽性コントロール及び容器、スワブ、クイック チェイサー® Auto Adenoのテストカートリッジ等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)又はグルタルアルデヒド(2%、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121°C、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。但し、クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno及びクイック チェイサー® Auto Adeno 眼のテストカートリッジは次亜塩素酸ナトリウム、グルタルアルデヒドなどの消毒液による処理は行わないで下さい。

- ④容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
- ⑤試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

***【有効期間】**

製造後24ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

****【包装単位】**

クイック チェイサー® Auto用 陽性コントロール Adeno 400μL×3本

****【お問い合わせ先】**

株式会社ミズホメディー 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636（受付：月～金（祝日を除く）9:00～12:00 13:00～17:00）